

Guide til myControl App.



Denne guide gælder til Android.

Før du begynder:

- Hav smartphone og høreapparater klar.
- Hent "Signia myControl" fra Google Play.
- Vigtigt: Sluk og tænd høreapparaterne.
- Du har nu tre minutter til at gennemføre opsætningen.


Alle Skærmbilleder er taget med Samsung Galaxy S8 SM-G950F. Der kan være forskelle i features, skærmbilleder og funktioner til andre Android-enheder.

Indhold:

Tænd for Bluetooth på smartphone	2
Opsætning af app	4
Brugervejledning	6
Praktisk info	10


Tænd for Bluetooth på smartphone.

Trin 1

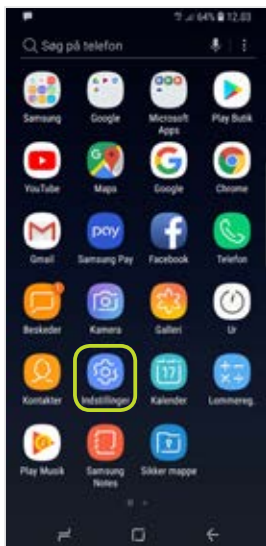


Gå ind under "Indstillinger".

Trin 2

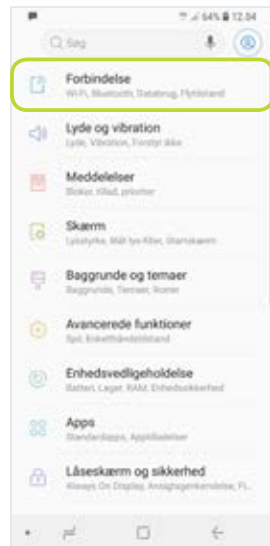


Find Bluetooth-menuen.

Trin 3

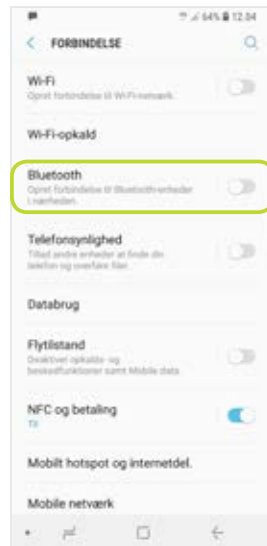

Tænd for Bluetooth, hvis dette ikke allerede er gjort.

Trin 4

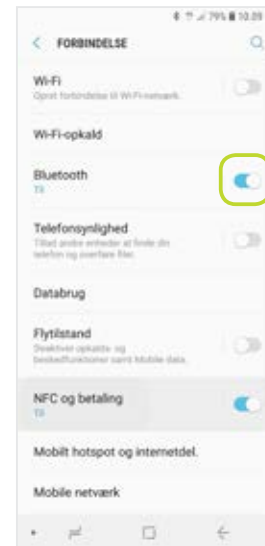

Bluetooth er nu tændt.



Opsætning af app.

Trin 1




Placer høreapparaterne mindre en 30 cm fra smartphonen.
Åbn "myControl App". Tryk på "Lad os starte".

Trin 2



Tryk på "Næste".

Trin 3

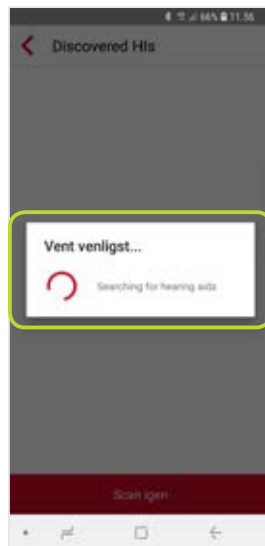


myControl App søger efter høreapparaterne.

Trin 4



Navnet på brugeren vises i feltet øverst.

Trin 5

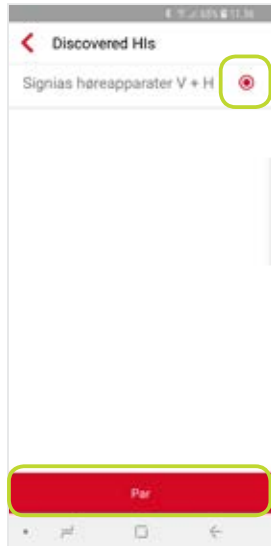

Tryk på feltet, hvor navnet på brugeren vises, og tryk derefter på "Par".

Trin 6



Tryk på "Start oplevelsen".

Brugervejledning

Hovedskærm




- A. Programmer.**
Mulighed for at skifte mellem høreapparaternes programmer.
- B. Mikrofonvolumen.**
Her er det muligt at skrue op eller ned for høreapparatets lydstyrke. Hvis der er lavet et tinnitusprogram, vil det være muligt at skrue op og ned for masker-signalet separat i tinnitusprogrammet.
- C. Spatial Konfigurator.**
Mulighed for justering af høreapparaternes fokusområde.
- D. Lydeksposering.**
Oplysninger om daglig lydeksposering.
- E. Indstillinger.**
Klik for flere indstillinger.

A. Programmer



Skift mellem de forskellige lytteprogrammer her. Tryk på **"Rediger"** for at omdøbe programnavn. Kun høreklinikken kan tilføje eller fjerne lytteprogrammer.

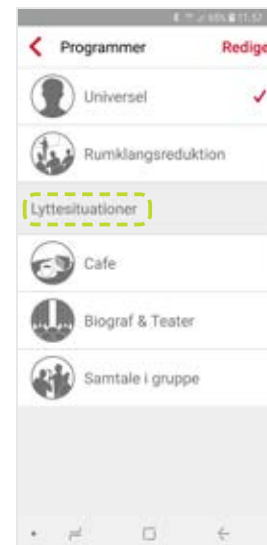

Lyttesituationer: "Cafe", "Biograf & Teater" og "Samtale i gruppe" er forslag til bedst mulig indstilling af høreapparaterne i disse situationer.

Spatial Konfigurator er tilgængelig i produktrin 5 og 7 og fungerer kun ved brugen af to apparater.

Spatial Konfigurator er tilgængelig i udvalgte Signia-modeller.

C. Spatial Konfigurator



Her er det muligt at styre apparaternes fokusområde. Det røde område er den retning, hvor man hører bedst. Det er muligt at fokusere til højre, venstre, forfra (vist) og bagfra.



Spændvidde: I situationer med meget baggrundsstøj er det muligt at gøre fokusområdet foran smalt, så det er nemmere at høre tale forfra.




Tryk på "360", og apparaterne opfanger lyden hele vejen omkring brugeren. Denne indstilling kan anvendes i situationer, hvor man ønsker at høre mest muligt fra omgivelserne fx fuglene i skoven.



Ved tryk på "Automatisk" overtager høreapparaterne styringen af mikrofonen og vil selv finde den mest optimale indstilling.

D. Lydeksponering

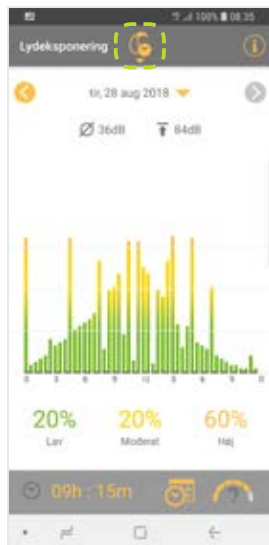

Her bliver den daglige lydeksponering fra omgivelserne vist til påmindelse om at passe på med for meget støj. Der er mulighed for at se, hvor mange timer apparaterne er blevet brugt dagligt. Skærmen lukkes ved at trykke på ikonet øverst.

E. Indstillinger



1

2

1. Sound Balance: Juster om lyden skal være mere eller mindre skarp.
2. Det er muligt at kontrollere batteristatus.



3



3. Sæt høreapparatet i flytilstand og appen i akustisk tilstand. Derved afbrydes Bluetooth i høreapparaterne. Det vil fortsat være muligt at fjernbetjene apparaterne, men streaming af lyd er ikke muligt.



4


5

4. Lydeksponering: se "D".
5. Bevægelsesføler: Forbedrer høreapparaternes respons i bestemte situationer.

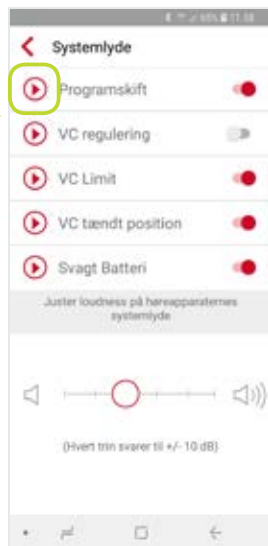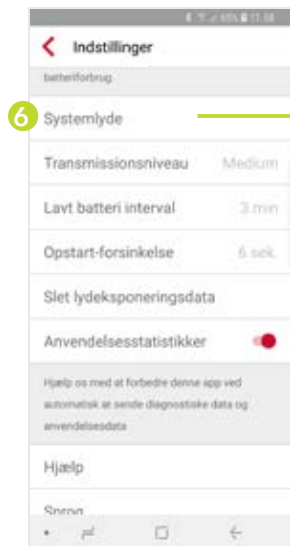


6. Opsætning af systemlyde, som er de lyde, apparaterne laver ved fx programskift.

Her er det muligt at aktivere/deaktivere de forskellige systemlyde samt øge lydstyrken for lydene. Tryk på "**play**"-knappen for at få demonstreret lyden.

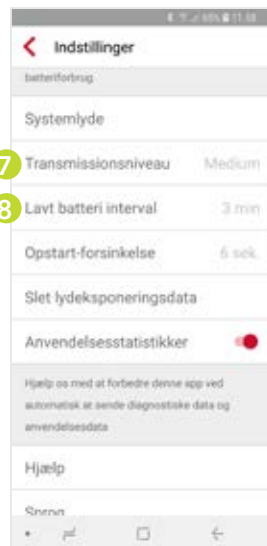

7. Når appen er i akustisk tilstand, kan transmissionsniveau øges. Dette er kun nødvendigt, hvis appen beder om det.
8. Sæt intervallet for, hvor ofte alarmen for lavt batteri-niveau skal høres.

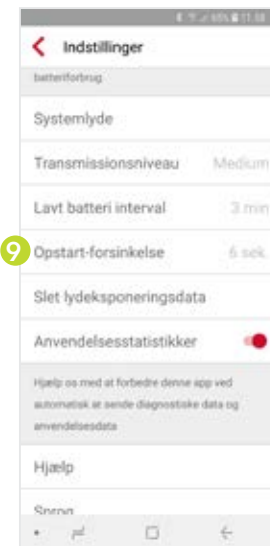

9. Forsinker opstart af apparaterne med 6, 12 eller 18 sekunder.

Praktisk info

Tips & Tricks

Høreapparaterne nulstilles, når de slukkes. Ændringer i lydstyrke, programvalg, Spatial Konfigurator og Sound Balance annulleres og sættes i default.

Genstart din smartphone: Der er næsten dagligt opdateringer til apps og styresystemer, og en daglig genstart sikrer, at din smartphone fungerer optimalt.

Visse Android-smartphones har lydeffekter således, at musik og anden lyd, der bliver afspillet via telefonens højttaler, får mere fylde og rumklang. Disse effekter skal deaktiveres, for at myControl App kan fungere i flytilstand.

Under opsætning kan appen bede om adgang til mediefiler for at kunne streame lyd og adgang til enhedens placering for at kunne anvende smartphonens bevægelsesføler.

Kompabilitet

Android: 6.0 eller nyere

Signia myControl App er per august 2018 kompatibel med følgende Android-enheder:

- Samsung Galaxy S9 (Android 8.0 eller højere)
- SM-G960F
- Samsung Galaxy S8 (Android 7.0 eller højere)
- SM-G950F
- SM-G950U1
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy S7 (Android 7.0 eller højere)
- SM-G930FD
- SM-G930V
- Samsung Galaxy S7 Edge (Android 7.0 eller højere)
- SM-G935F
- Samsung Galaxy S6
- SM-G920I Samsung (Android 6.0.1 eller højere)
- Samsung Galaxy S6 Edge
- SM-G925F (Android 7.0 eller højere)

Høreapparater

Signia Nx

Modeller

Pure Charge&Go

Pure 312

Pure 13

Motion 13

Informationen i dette dokumentet indeholder generelle beskrivelser af de tilgængelige teknologier, som ikke altid er indeholdt i alle produkter, og som kan ændres uden forvarsel.

Varemærket Bluetooth og tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse mærker af Signia GmbH sker under licens. Andre varemærker og produktnavn ejes af respektive indehavere.

Android og Google Play er varemærker for Google Inc.
Apple App Store er et varemærke for Apple Inc.

iPhone er et varemærke for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Din kontakt i Danmark

Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 10

ce126/1/0718

© Signia GmbH 2018

www.signia.dk