

Guide til myControl App.



Denne guide gælder til iPhone.

Før du begynder:

Hav smartphone og høreapparater klar.

Hent "Signia myControl" fra App Store.

Vigtigt: Sluk og tænd høreapparaterne.

Du har nu tre minutter til at gennemføre opsætningen.

Alle Skærbilleder er taget med iPhone 7. Der kan være forskelle i features, skærbilleder og funktioner til andre iOS-enheder

Indhold:

Opsætning af Bluetooth	2
Opsætning af app	5
Brugervejledning	6
Praktisk info	10

Opsætning af Bluetooth.

Trin 1



Gå ind under "Indstillinger".

Trin 2



Find Bluetooth-menuen.

Trin 3



Tænd for Bluetooth, hvis dette ikke allerede er gjort.

Trin 4



Gå tilbage til "indstillinger".

Trin 5




Gå ind under "Generelt".

Trin 6



Gå ind under "Tilgængelighed".

Trin 7

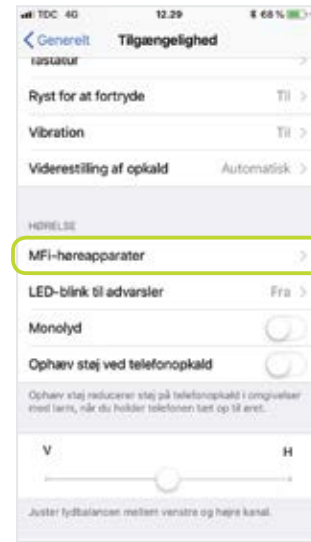


Vælg "Mfi-høreapparater".

Trin 8



Høreapparatet detekteres, og navnet på brugeren vises øverst. Tryk på feltet.

Trin 9

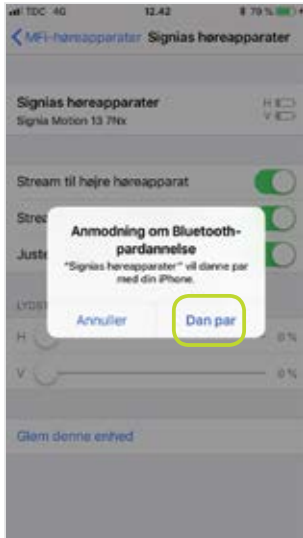

Tryk på "Dan par" én gang for højre og én gang for venstre apparat.

Trin 10



Høreapparaterne bliver nu læst. Lydstyrke og eventuelle lytteprogrammer vises.

Du kan nu forlade "Indstillinger".


Opsætning af app.

Trin 1



Åbn "MyControl App". Hvis dette gøres umiddelbart efter Bluetooth-opsætning, tryk da blot på "Næste"

Trin 2

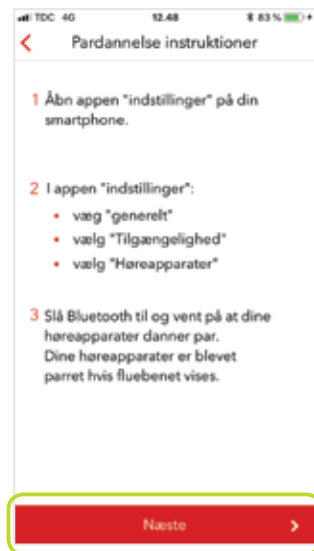

Tryk på "Næste".

Trin 3



Parring til høreapparaterne foregår automatisk.

Trin 4



Tryk på "Start oplevelsen".

Brugervejledning

Hovedskærm




- A. Programmer.**
Mulighed for at skifte mellem høreapparaternes programmer.
- B. Mikrofonvolumen.**
Her er det muligt at skrue op eller ned for høreapparatets lydstyrke. Hvis der er lavet et tinnitusprogram, vil det være muligt at skrue op og ned for masker-signalet separat i tinnitusprogrammet.
- C. Spatial Konfigurator.**
Mulighed for justering af høreapparaternes fokusområde.
- D. Lydeksposering.**
Oplysninger om daglig lydeksposering.
- E. Indstillinger.**
Klik for flere indstillinger.

A. Programmer



Skift mellem de forskellige lytteprogrammer her. Tryk på **"Rediger"** for at omdøbe programnavn. Kun høreklinikken kan tilføje eller fjerne lytteprogrammer.

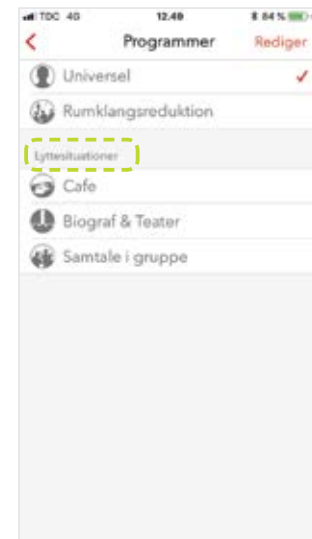

Lyttesituationer: "Cafe", "Biograf & Teater" og "Samtale i gruppe" er forslag til bedst mulig indstilling af høreapparaterne i disse situationer.

C. Spatial Konfigurator



Her er det muligt at styre apparaternes fokusområde. Det røde område er den retning, hvor man hører bedst. Det er muligt at fokusere til højre, venstre, forfra (vist) og bagfra.



Spændvidde: I situationer med meget baggrundsstøj er det muligt at gøre fokusområdet foran smalt, så det er nemmere at høre tale forfra.

Spatial Konfigurator er tilgængelig i produktrn 5 og 7 og fungerer kun ved brugen af to apparater.
Spatial Konfigurator er tilgængelig i udvalgte Signia-modeller.




Tryk på "360°", og apparaterne opfanger lyden hele vejen omkring brugeren. Denne indstilling kan anvendes i situationer, hvor det ønskes at høre mest muligt fra omgivelserne fx fuglene i skoven.




Ved tryk på "Automatisk" overtager høreapparaterne styringen af mikrofonen og vil selv finde den mest optimale indstilling.

D. Lydeksponering

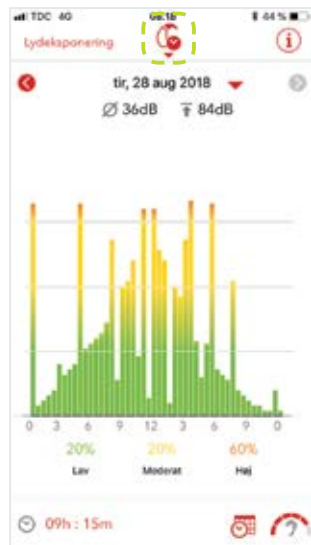


Her bliver den daglige lydeksponering fra omgivelserne vist til påmindelse om at passe på med for meget støj. Der er mulighed for at se, hvor mange timer apparaterne er blevet brugt dagligt. Skærmen lukkes ved at trykke på ikonet øverst.


E. Indstillinger

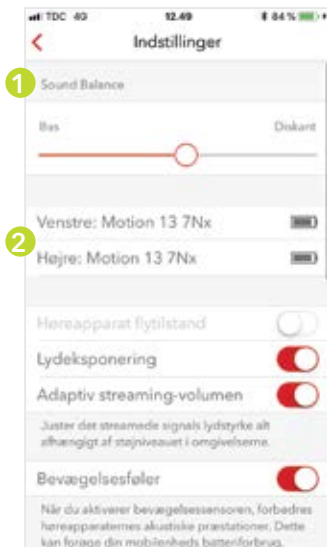


1. Sound Balance: Juster om lyden skal være mere eller mindre skarp.
2. Det er muligt at kontrollere batteristatus.

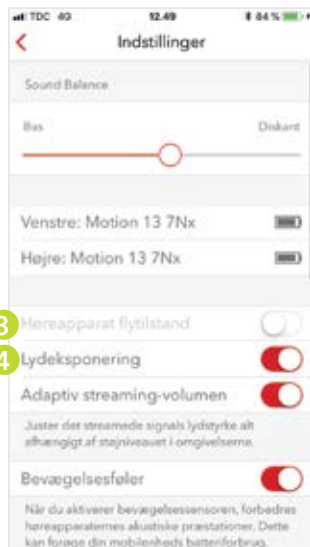


3. Sæt høreapparaterne i flytilstand og appen i akustisk tilstand. Derved afbrydes Bluetooth i høreapparaterne. Det vil fortsat være muligt at fjernbetjene apparaterne, men streaming af lyd er ikke muligt.
4. Lydeksponering: se "D"

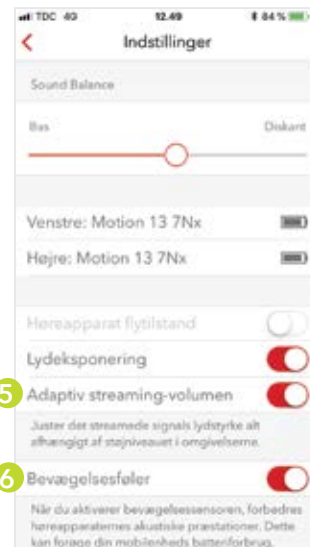

5. Adaptiv streaming-volumen: Juster det streamede signals lydstyrke alt afhængigt af støjniveauet fra omgivelserne.
6. Bevægelsesføler: Forbedrer høreapparaternes respons i bestemte situationer.

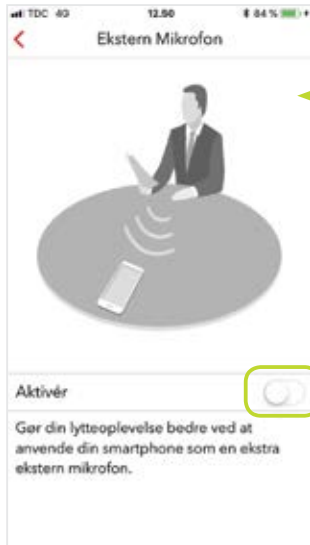

Denne funktion gør iPhone til en ekstra mikrofon. Denne kan fx bruges, når man ønsker at høre en bestemt taler i støjende omgivelser.

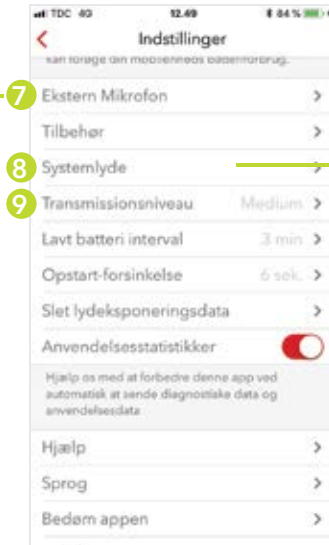

7. Gør iPhone til en ekstra mikrofon.
8. Opsætning af systemlyde, som er de lyde, apparaterne laver ved fx programskift.
9. Når appen er i akustisk tilstand, kan transmissionsniveau øges. Dette er kun nødvendigt, hvis appen beder om det.



Her er det muligt at aktivere/deaktivere de forskellige systemlyde samt øge lydstyrken for lydene. Tryk på **"play"**-knappen for at få demonstreret lyden.



10. Sæt intervallet for, hvor ofte alarmen for lavt batteri-niveau skal høres.
11. Forsinker opstart af apparaterne med 6, 12 eller 18 sekunder.

Tips & Tricks

Høreapparaterne nulstilles, når de slukkes. Ændringer i lydstyrke, programvalg, Spatial Konfigurator og Sound Balance annulleres og sættes i default.

Genstart din smartphone: Der er næsten dagligt opdateringer til apps og styresystemer, og en daglig genstart sikrer, at din smartphone fungerer optimalt.

I flytilstand anvender appen højfrekvente toner, som sendes fra telefonen til høreapparaterne. iPhones har den begrænsning, at de ikke kan sende tonerne samtidigt med, at andet audioudstyr er tilkoblet. Så hvis telefonen er tilkoblet udstyr som fx GPS eller "hands-free"-udstyr, kan telefonen ikke sende tonerne til høreapparaterne samtidigt med, at den er tilkoblet dette udstyr.

Under opsætning kan appen bede om adgang til mediefiler for at kunne streamme lyd og adgang til enhedens placering for at kunne anvende smartphonens bevægelsesføler.

Kompabilitet

iOS: 9.3 eller nyere

Høreapparater

Signia Nx

Modeller

Pure Charge&Go

Pure 312

Pure 13

Motion 13

Informationen i dette dokumentet indeholder generelle beskrivelser af de tilgængelige teknologier, som ikke altid er indeholdt i alle produkter, og som kan ændres uden forvarsel.

Varemærket Bluetooth og tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse mærker af Signia GmbH sker under licens. Andre varemærker og produktnavn ejes af respektive indehavere.

Android og Google Play er varemærker for Google Inc.
Apple App Store er et varemærke for Apple Inc.

iPhone er et varemærke for Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Din kontakt i Danmark

Sivantos A/S
Ove Gjeddes Vej 9
5220 Odense SØ
Telefon 63 15 40 10

ce127/1/0718

© Signia GmbH 2018

www.signia.dk